

FICHA TÉCNICA

# ANPHOTEROL® DCM

**Descontaminador nebulizado personal con solución ANPHOTEROL® cutáneo y ocular.**

SKU: DCM100, DCM200

**SOLO UTILIZAR EN CASO DE QUEMADURA QUÍMICA**

**DESCRIPCIÓN:**

Es un dispositivo médico clase II, que consiste en un sistema de lavado de primeros auxilios con solución Anphoterol® en formato aerosol y acción nebulizada, indicados para piel y ojos, en caso de accidentes por salpicaduras con agentes químicos ácido-base, oxidantes-reductores y corrosivos-irritantes.

**Presentado en dos formatos de 100 mL y 200 mL con solución Anphoterol®.**

**BENEFICIOS**

- Solución biodegradable desarrollada con componentes presentes en el cuerpo humano.
- No produce daño o traumas en la zona ocular o cutánea.
- Presentación ligera y fácil de manipular.
- Spray nebulizado.



**DCM 200**  
SPRAY TIPO NIEBLA 200mL  
(Tapa Verde)

**DCM 100**  
SPRAY TIPO NIEBLA 100mL  
(Tapa Blanca)

**MODO DE USO**

Solo se debe girar y presionar la tapa del dispositivo, y la solución Anphoterol®, saldrá expulsada como spray nebulizado. Aplique directamente en la superficie afectada a una distancia de 10 a 15 cm, vaciando **TODO** el contenido del envase. (Ver protocolo de Uso)

- DCM100 indicado para áreas afectadas hasta 3%.
- DCM200 indicado para áreas afectadas hasta 9%.

**ALMACENAMIENTO**

Mantener producto a temperatura superior a 2°C y menor a 50°C.

**CERTIFICACIONES**

- Conforme ISP DDM/2027/19
- ISO 13485

**CARACTERÍSTICAS**

SKU	Peso Neto	Peso Bruto	Dimensiones	Gas Propulsor	Vencimiento	Uso	Tiempo de Lavado
DCM100	100 mL 104 g de Solución Anphoterol®	100 mL 0,17Kg	Ø53mm H:180mm	Aire comprimido	24 meses	Cutánea y ocular	120 s.
DCM200	200 mL 208 g de Solución Anphoterol®	200 mL 0,27 Kg	Ø53mm H: 210 mm				240 s.

