

FICHA TÉCNICA

ANPHOTEROL® DMT

Descontaminador nebulizado portátil con solución ANPHOTEROL® cutáneo y ocular.

SKU: DMT2L, DMT5L

SOLO UTILIZAR EN CASO DE QUEMADURA QUÍMICA



DMT2L
DESCONTAMINADOR
(Versión Pequeño)

DMT5L
DESCONTAMINADOR
(Versión Grande)

DESCRIPCIÓN:

Es un dispositivo médico clase II, que consiste en un sistema de lavado de primeros auxilios de solución Anphoterol® portátil y de fácil aplicación con acción nebulizadora, indicados para piel y ojos, en caso de accidentes por salpicaduras con agentes químicos ácido-base, oxidantes-reductores y corrosivos-irritantes. **Presentado en dos formatos de 2 Litros y 5 Litros de solución Anphoterol®.**

BENEFICIOS

- Solución Biodegradable desarrollada con componentes presentes en el cuerpo humano.
- No produce daño o traumas en la zona ocular o cutánea.
- Transportable de un área de trabajo a otro.
- Rociado Nebulizado.
- Accesorios incluidos para instalación en muro.
- Manguera de 1,2m de largo para fácil maniobrabilidad.
- Material acero inoxidable.

MODO DE USO

Tirar el pin de seguridad para romper precinto, accionar la manilla y lavar de inmediato. Aplique directamente en la superficie afectada a una distancia entre 10-15 cm, vaciando **TODO** el contenido del envase. **Producto Unidosis.** (Ver protocolo de Uso)

- DMT2L indicado para áreas afectadas que abarquen una extensión 9-36% SCT: Superficie corporal total.
- DMT5L indicado para áreas afectadas que abarquen una extensión 37-100% SCT: Superficie corporal total.

ALMACENAMIENTO

Mantener producto a temperatura superior a 2°C y menor a 50°C. Se recomienda la adquisición conjuntamente de ACC2, para garantizar mejor cuidado y protección en ambientes agresivos o si serán instalados a la intemperie. Se recomienda la adquisición conjuntamente de ST3, en el caso de trabajar con temperaturas extremas.

CERTIFICACIONES

- Conforme ISP DDM/2027/19
- ISO 13485

CARACTERÍSTICAS

SKU	Peso Neto	Peso Bruto	Dimensiones	Gas Propulsor	Vencimiento	Uso	Tiempo de Lavado
DMT2L	2L 2,1 Kg de Solución Anphoterol®	4,2 Kg	W: 15 cm L: 15 cm H: 45 cm	14kg/cm² Nitrógeno	24 meses	Cutánea y ocular	-4 min.
DMT5L	5L 5,2 Kg de Solución Anphoterol®	8,2Kg	W: 18 cm L: 18 cm H: 55 cm				-8 min.

