




**1**  
Ir a la zona de seguridad



**2**  
Tirar el PIN de seguridad

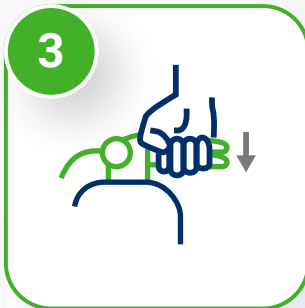

**3**  
Accionar la manilla



**4**  
Lavar de inmediato usando todo el contenido



**5**  
Quitarse la ropa afectada



**6**  
Reportar el accidente

**SOLO UTILIZAR EN CASO DE QUEMADURA QUÍMICA**

Utilizar inmediatamente todo el contenido del envase



- DISPOSITIVO MÉDICO DMT 2L
- DISPOSITIVO MÉDICO DMT 5L

Ver ficha técnica de cada modelo.



**7**  
Consultar con el médico

## INSTRUCCIONES DE USO DMT

### PROPÓSITO DISPOSITIVO DMT - ANPHOTEROL®

El formato DMT está diseñado como una ducha de emergencia frente a accidentes químicos que afecten a una superficie corporal superior al 9%.

### ¿QUÉ ES EL DMT?

El DMT es un dispositivo médico que cuenta con un sistema de eyección nebulizada, el cual permite que la solución anphoterol® pueda ser aplicada frente a una emergencia química en toda la superficie corporal, inclusive en la zona ocular, permitiendo evitar o retrasar las lesiones químicas provocadas en los accidentes por contacto con agentes químicos ácido-base, oxidantes-reductores y corrosivos-irritantes. Este formato se encuentra disponible en dos presentaciones de 2 y 5 Litros de solución Anphoterol®.

### USO DEL DMT

El dispositivo DMT permite un lavado efectivo durante el primer minuto de ocurrido el accidente, brindando un volumen de solución adecuado para irrigar lesiones químicas extensas que hayan afectado más del 9% de la superficie corporal. El DMT debe estar ubicado cercano a las zonas que tenga exposición con agentes químicos. Al ser un producto portátil, permite que pueda ser transportado a otras zonas de ser necesario.

### INSTRUCCIONES RECOMENDADAS PARA UNA MÁXIMA EFICACIA

Para detener eficazmente el avance de la quemadura química se recomienda utilizar TODO el contenido del envase DMT, siguiendo los pasos del protocolo de uso. Si el químico salpica o es vertido en la ropa, se debe aplicar la solución en la zona contaminada y posteriormente proceder con el retiro de las prendas, esto con la finalidad de no afectar otras áreas del cuerpo. Es importante que, durante el proceso de lavado de la zona afectada, se evite el movimiento en abanico con la manguera del dispositivo DMT, para no desperdiciar la solución Anphoterol® en el ambiente.

### RECOMENDACIONES GENERALES

El dispositivo DMT debe ser usado como primera medida de acción ante un evento de quemadura química. Solo en el caso de que la solución Anphoterol® no esté disponible en lugar del accidente químico, recurra inmediatamente al lavado con agua. Si tiempo después ya se tiene acceso al dispositivo, este puede ser aplicado como segundo lavado para garantizar la óptima neutralización y eliminación del agente cáustico. Prevea que las unidades DMT no excedan la fecha de vencimiento especificada en el envase.

### ALCANCE DE EFECTIVIDAD DE LA SOLUCIÓN ANPHOTEROL®

Gracias al principio activo de la solución Anphoterol®, posee un alcance polivalente para ser aplicado en todo tipo de quemaduras químicas que sean derivadas del contacto con agentes químicos ácido-base, oxidantes-reductores y corrosivos-irritantes. Contacte al ejecutivo de ventas para ser asistido técnicamente en la selección del formato DMT adecuado.

## INSTRUCCIONES DE USO DMT

### ¿QUÉ HACER EN CASO DE QUE LA LESIÓN SE HAYA DESARROLLADO, O SI INTERVENGO DESPUÉS DE LOS 60 SEGUNDOS?

Transcurridos los primeros 60 segundos de exposición al agente cáustico, es crucial iniciar el lavado lo antes posible, ya que la lesión podría agravarse. Se recomienda aplicar un volumen de solución Anphoterol® equivalente a 4 veces lo recomendado. El uso tardío de Anphoterol®, presenta mejores resultados que una quemadura no tratada.

### CUIDADO Y MANTENIMIENTO DEL DMT

El dispositivo DMT debe estar almacenado en un lugar donde no esté expuesto a la luz directa, se aconseja que las temperaturas deben oscilar entre 2 y 50°C. Si el dispositivo se expone por períodos prolongados de tiempo en ambientes fuera del rango mencionado, se verá afectada la correcta eyección de la solución Anphoterol®. Si tienes dudas con este punto puedes comunicarte con nuestros ejecutivos quienes te recomendarán el accesorio que pueda garantizar un correcto almacenaje. El dispositivo DMT debe ser reemplazado antes de la fecha de expiración, que se encuentra en la parte lateral del cilindro. Además, se debe considerar una revisión rutinaria del manómetro, cuyo indicador de presión debe ubicarse dentro de la zona verde.

### TOXICOLOGÍA:

La solución de Anphoterol® es un producto no irritante, no alérgico y no tóxico a la piel y ojos.